

**Veel plezier met deze op maat  
gemaakte VSO-(sport)zolen**

**Wij ondersteunen  
maximale prestatie**



[www.vsonetwerk.nl](http://www.vsonetwerk.nl)



## Gebruiksaanwijzing voor uw individueel vervaardigde VSO-(sport)steunzool

### 1. Inzet en gebruik

- Uw VSO-(sport)steunzool is een hulpmiddel dat individueel voor u is vervaardigd
- Verwijder indien mogelijk de originele zolen uit de schoenen
- Leg uw zolen in daarvoor geschikte schoenen, een langzame gewenning kan noodzakelijk zijn
- Bij onvoldoende comfort graag contact met ons opnemen

### 2. Schoen en steunzooltype

- Om het gewenste effect te bereiken moeten schoen en steunzool op elkaar afgestemd zijn
- Een goede pasvorm optimaliseert het effect

### 3. Schoonmaak en onderhoud

- Neem de zolen uit de schoenen om te luchten en te drogen
- Met een vochtige doek kan de zool licht worden gereinigd
- Onze MPG-geteste materialen sluiten allergische reacties uit. Mochten deze toch optreden neem dan contact op
- De zolen niet verwarmen boven 50°C
- Controle na een jaar gebruik, voor kinderen na een maat groei van de voeten

### 4. Overig

- Elke benodigde aanpassing binnen een half jaar na aanschaf is service
- Na twee weken moeten de zolen vertrouwd aanvoelen, na 6 weken of eerder moet u verbetering merken
- Mocht de zool iets lang zijn dan kunt u eenvoudig aan het einde een randje afknippen
- Wanneer de zolen goed bevallen en u gebruikt ze intensief, dan raden wij u een tweede paar aan. Uiteindelijk gaan ze daardoor langer mee

